



Detta ser du.  
 Detta hör du.  
 Gör detta.

Följande kan visas på LCD-skärmen:  
 Textmeddelanden  
 Chockräknare  
 Tid som gått  
 EKG-vågform

**Börja här**

Personen faller ihop. Misstänkt hjärtstillestånd.  
 Enhet OK.  
 Sätt på defibrillatorn.  
 Funktionstest. Enhet OK.

Andra meddelanden som kan höras:  
 Anslut kabeln.  
 Enheten ur drift.  
 Släpp chock-knappen.  
 Byt batterier.  
 (x) chocker har levererats.

Gör detta:  
 Anslut elektrokabeln.  
 Stäng av defibrillatorn och sätt sedan på den.  
 Om defibrillatorn ändå inte fungerar ger du HLR.  
 Släpp chockknappen.  
 Byt alla tio batterierna.

**INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING**

Används när en patient har en uppenbar cirkulationsbrist som yttrar sig i:

- medvetlöshet och
- frånvaro av normal andning och
- frånvaro av puls eller tecken på cirkulation.

Om patienten är yngre än 8 år eller väger mindre än 25 kg ska ZOLL AED Plus användas med ZOLL AED Plus pediatrika elektroder. Låt inte bestämningen av patientens exakta ålder eller vikt göra att behandlingen fördröjs.

**KONTRAIKATIONER FÖR ANVÄNDNING**

Används INTE när en patient:

- är vic medvetande eller andas eller
- har märkbar puls eller andra tecken på cirkulation.

**AVSEDD ANVÄNDARE**

Den externa defibrillatorn ZOLL AED Plus är avsedd att användas av personer som genom utbildning har de kunskaper som krävs för att använda AED Plus-enheten och vidta grundläggande livsuppehållande åtgärder, avancerade livsuppehållande åtgärder eller andra av läkare godkända medicinska akuta åtgärder för defibrillering av personer som drabbats av hjärtstillestånd. I HLR-övervakningsfunktionen ingår en metronom, som ska hjälpa användaren att utföra bröstkompressioner med frekvensen 100 kompressioner per minut. Denna frekvens rekommenderas av ERC. Genom röst- och textmeddelanden får användaren hjälp att uppnå ett kompressionsdjup på 5 - 6 cm för vuxna patienter. Funktionen för HLR-övervakning är inte avsedd att användas på patienter under 8 års ålder.

Om patienten är medvetlös, Öppna luftvägarna.

**Kontrollera andningen.**  
 Titta om bröstkorgen rör sig;  
 Lyssna efter andningsljud vid patientens mun;  
 Känn efter luft på din kind;  
 Avgör om patienten har normal, onormal eller ingen andning.

Placera elektrodpattor enligt bilden på patienter under 8 års ålder eller < 25 kg.

**ZOLL**

ZOLL Medical Corporation  
 269 Mill Road  
 Chelmsford, MA 01824-4105  
 +1 978-421-9655  
 www.zoll.com